

## 3 PROSTE KROKI

do **szybszego, łatwiejszego**  
i **bezpieczniejszego** nakłucia

# ACCU-CHEK® Multiclix

– instrukcja obsługi



## 1. NACIĄGNIJ

Naciśnij przycisk naciągający **A** w dół (tak jak wciskasz długopis).

Na przezroczystym przycisku **B** spustowym pojawi się żółty punkt.



## 2. NACIŚNIJ

Mocno dociśnij końcówkę nakłuwacza z boku opuszki palca i naciśnij przycisk spustowy.



## 3. OBRÓĆ

Jeśli chcesz zmienić lancet, przekręć przycisk naciągający do oporu **C** i z powrotem.





Białe paski widoczne w okienku **D** wskazują ile lancetów pozostało w bębenku do użycia.



ACCU-CHEK®

# ACCU-CHEK® Multiclix – instrukcja obsługi

## Jak wymienić bębenek z lancetami

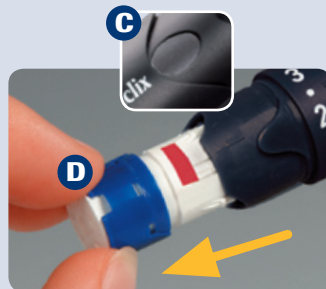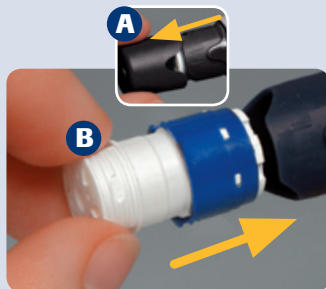

### Wkładanie bębena

- Zdejmij nasadkę **A**.
- Wsuń nowy bębenek do oporu **B** (strona z niebieskim pierścieniem w kierunku nakłuwacza).
- Nałóż nasadkę.

### Wymiana bębena

- Jeśli w okienku nie pojawiają się białe paski **C**, oznacza to, że wszystkie lancety zostały zużyte.
- Zdejmij nasadkę **A**.
  - Wyjmij zużyty bębenek **D** (nie może być włożony ponownie).
  - Wyrzuć zużyty bębenek do śmieci.
  - Wsuń nowy bębenek **B** i nałóż nasadkę.

## Jak ustawić głębokość nakłucia



### Jak ustawić głębokość nakłucia

- Obróć pierścień z cyframi, żeby wybrać głębokość nakłucia.
- Jeśli pierwszy raz używasz nakłuwacza Accu-Chek Multiclix, zalecamy ustawić pierścień na „1”.

Teraz nakłuwacz Accu-Chek Multiclix jest gotowy do pracy –

**NACIĄGNIJ, NACIŚNIJ i OBRÓĆ**



Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  
ul. Wybrzeże Gdyni 6B  
01-531 Warszawa  
[www.accu-chek.pl](http://www.accu-chek.pl)  
Bezpłatna infolinia 0-800 401 061

ACCU-CHEK®