

3 PROSTE KROKI

do **szybszego, łatwiejszego**
i **bezpieczniejszego** nakłucia

ACCU-CHEK® Multiclix

– instrukcja obsługi



1. NACIĄGNIJ

Naciśnij przycisk naciągający **A** w dół (tak jak wciskasz długopis).

Na przezroczystym przycisku **B** spustowym pojawi się żółty punkt.



2. NACIŚNIJ

Mocno dociśnij końcówkę nakłuwacza z boku opuszki palca i naciśnij przycisk spustowy.



3. OBRÓĆ

Jeśli chcesz zmienić lancet, przekręć przycisk naciągający do oporu **C** i z powrotem.





Białe paski widoczne w okienku **D** wskazują ile lancetów pozostało w bębenku do użycia.



ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Multiclix – instrukcja obsługi

Jak wymienić bębenek z lancetami

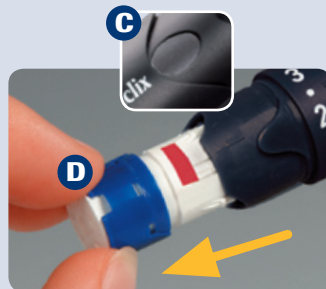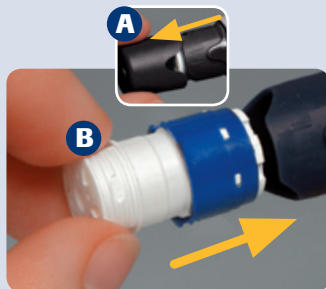

Wkładanie bębena

- Zdejmij nasadkę **A**.
- Wsuń nowy bębenek do oporu **B** (strona z niebieskim pierścieniem w kierunku nakłuwacza).
- Nałóż nasadkę.

Wymiana bębena

- Jeśli w okienku nie pojawiają się białe paski **C**, oznacza to, że wszystkie lancety zostały zużyte.
- Zdejmij nasadkę **A**.
 - Wyjmij zużyty bębenek **D** (nie może być włożony ponownie).
 - Wyrzuć zużyty bębenek do śmieci.
 - Wsuń nowy bębenek **B** i nałóż nasadkę.

Jak ustawić głębokość nakłucia



Jak ustawić głębokość nakłucia

- Obróć pierścień z cyframi, żeby wybrać głębokość nakłucia.
- Jeśli pierwszy raz używasz nakłuwacza Accu-Chek Multiclix, zalecamy ustawić pierścień na „1”.

Teraz nakłuwacz Accu-Chek Multiclix jest gotowy do pracy –

NACIĄGNIJ, NACIŚNIJ i OBRÓĆ

